

COVID Shield Pro

Verwendungszweck / Nutzerinformation

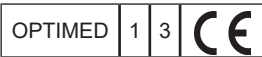
Produkt-Bezeichnung	COVID Shield Pro	
Beschreibung / Aufbau	Das COVID Shield Pro besteht aus einer Sichtscheibe an dem ein ergonomisch geformter Schaumstoff sowie ein Kopfband befestigt sind. Das Band ist individuell durch eine Schnalle einstellbar (siehe Abb.).	
Leistungsbeschreibung	<p>Das Visier soll gegen Gefährdungen durch Tröpfcheninfektionen schützen und damit die Verbreitung des Corona-Virus reduzieren.</p> <p>Das Gesichtsschutzschild schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten (z.B. Körperflüssigkeiten). Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Das COVID Shield Pro kann mit Atemschutzmasken und persönlichen korrigierenden Brillen kombiniert werden.</p>	
Materialien	Kopfband	Polyester, Elasthan
	Schaumstoff	Polyurethan
	Sichtscheibe	PMMA/Polycarbonat
Farbe der Kopfhalterung	weißer PU-Schaum 30 x 40 x 250 mm, ÖkoTex 100	
Stärke der Sichtscheibe	0,375 mm, alkoholbeständig	
Scheibentönung	klar	
Gewicht	ca. 50 g	
Maße Produkt	30 x 21 x 4,2 cm (B x L x H)	
Risiko	Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben, daher ist das Gesichtsvisier in Verbindung mit Halbmasken oder filtrierenden Halbmasken vorgesehen. Das Gesichtsschutzschild bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen, Stöße, Splitter, mechanische Teile und ähnliches.	
Kennzeichnung	<p>COVID Shield Pro</p> 	
	Das Produkt erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN 166:2001 (teilweise angewandt).	
Notifizierte Stelle	ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Deutschland	
Bereithaltung / Lagerung	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze, Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.	
Handhabung	Vor der ersten Anwendung muss von beiden Seiten die Schutzfolie abgezogen und entfernt werden. Die Befestigung erfolgt mittels Kopfband, welches durch eine Schnalle individuell justiert und fixiert werden kann (siehe Abb.).	
Hinweise zur Anwendung, Reinigung und Pflege	<p>Anwendungen des Gesichtsschutzschilds liegen im medizinischen Bereich, der Pflege, des Rettungswesens und anderen von COVID-19 betroffenen Arbeitsgebieten, welche gleichen Schutzzweck benötigen. Ein Gesichtsschutzschild sollte nur von einer Person verwendet werden. Bei der Verwendung sind die einrichtungsspezifischen Hygienerichtlinien zu befolgen. Das Visier des COVID Shield Pro ist mit Mitteln auf Alkoholbasis desinfizierbar. Das Produkt ist nicht sterilisierbar und nicht autoklavierbar. Die Wiederverwendung nach Desinfektion liegt im Ermessen des Anwenders. Bei vermuteter Kontamination ist das Produkt zu entsorgen. Sichtbare Verschmutzungen können mit einem, mit milder Seifenlauge getränkten, Tuch gereinigt werden. Zum Reinigen und Trocknen dürfen nur feine, fusselfreie Tücher verwendet werden. Bei der Verwendung muss beachtet werden, dass das COVID Shield Pro nicht fallen gelassen wird und nicht zerkratzen darf. Vor jedem Gebrauch ist das Gesichtsschutzschild auf Schäden hin zu untersuchen. Gesichtsschutzschilde sollen ausgetauscht werden, wenn sie zerkratzt, rissig, anderweitige Beschädigungen oder sonstigen mechanischen Verschleiß aufweisen, Änderungen in Form und Farbe zeigen, Chemikalien, Ölen oder Fetten, großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren. Schäden sind für den Endnutzer möglicherweise nicht sichtbar.</p>	
Entsorgung	Vor der Entsorgung muss das Visier gereinigt bzw. desinfiziert werden. Entsorgung nach den geltenden gesetzlichen bzw. internen Bestimmungen.	
Unbedenklichkeit	Von den eingesetzten Materialien für das Gesichtsschutzschild ist nicht bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind oder Hautreizungen verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können.	
Artikel Nummern / Verpackungseinheit	<p>9100-9050 - 50 Stk. im Versandkarton, 5 Innenverp. à 10 Visiere</p> <p>9100-9010 - 10 Stk. im Versandkarton</p> <p>9100-9002 - 2 Stk. im Versandkarton</p>	



Abb. 1
COVID Shield Pro

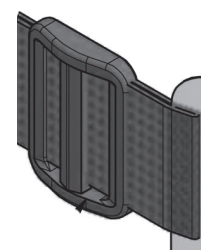


Abb. 2
Justierbare Schnalle

